

Conlight

Manual de instrucciones

Español

Descripción del producto

Conlight es un material en forma de gel fotopolimerizable que fue desarrollado para la modelación directa de pernos en boca. Se puede aplicar directamente desde la jeringuilla, se vacía después de repasarlo y se cuela en metal o cerámica. Es calcinable y no deja residuos. Su polimerización se hace sin tener que aplicar vacío. **Conlight** no está desarrollado para mantener permanentemente en boca.

Composición

Composición de resinas acrílicas, ingrediente de relleno y iniciadores.

Color Amarillo

Campos de indicación

- Para la modelación de pernos de forma directa
- Bloqueo intraoral de trabajos a colar
- Fijación intraoral de piezas a colar
- Elaboración de topes

Propiedades y ventajas

Conlight se aplica de forma líquida y sin embargo es estable. El material se puede introducir en la incrustación del canal radicular preparada y el perno puede ser modelado libremente. Debido a las propiedades del material se gasta poco en material y tiempo. **Conlight** no tiene sabor ni olor. Se puede repasar después de la fotopolimerización con las máquinas de luz comunes. El perno terminado es muy estable, preciso y se puede levantar sin deformaciones. **Conlight** se quema sin dejar residuos y garantiza un perfecto ajuste del perno colado.

Observaciones para el uso

Tras retirar la tapa de la jeringuilla es recomendable colocar la cánula de un solo uso para una aplicación exacta. Después del uso se debe volver a cerrar la jeringuilla. Para limitar la contracción durante la polimerización se deben modelar capas de **Conlight** de un máximo de 2 mm y seguidamente fotopolimerizar. La polimerización de capas superiores a 2 mm pueden causar la liberación de temperaturas altas y produce tensiones. Por lo tanto, un ajuste exacto no está garantizado. Polimerizar cada capa con la lámpara halógena durante 10 segundos. Una vez terminado se procede a la fotopolimerización final de 40 segundos.

Importante: Al modelar con varias capas no se debe quitar la capa de inhibición de la superficie puesto que ella garantiza una unión óptima entre las capas y evita tensiones.

Correcciones: En caso de tener que corregir un trabajo endurecido y repasado con instrumentos rotativos éste debe de estar exento de grasas y suciedad antes de volver a aplicar el **Conlight**.

No quitar la capa de inhibición con acetona antes de haber terminado completamente el trabajo.

Información para el colado

El objeto se vacía y se cuela como se realiza con los materiales habituales del mercado:

Aviso de precaución

Evite el contacto de **Conlight** con la mucosa y el ojo. No debe de estar en boca prolongadamente. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. No se puede excluir sensibilidades en personas con intolerancias contra algunos de sus componentes. En esa caso dejar de usar el producto. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Contraindicaciones, Interacciones

No se debe utilizar **Conlight** si existe una alergia contra alguno de sus componentes. Interacciones no son famosas.

Efecto secundario

Puede provocar una reacción alérgica.

Consideraciones relativas a la eliminación

Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentación local.

Instrucciones para la conservación

Almacenar entre 4 y 25 °C.

Proteger las jeringuillas del calor y la luz directa del sol. No usar después de la fecha de caducidad.

Forma de presentación

3 x 3 gramos de **Conlight** en jeringuillas
9 cánulas en una caja de plástico

Fabricante:

DeltaMed GmbH
Raiffeisenstraße 8a
D-61169 Friedberg
www.deltamed.de

DeltaMed

CE 0124

Importador:

Kuss Dental, S.L.
c/ Isabel Colbrand, 10 – Nave 95
E-28050 Madrid – Spain
Tel. +34 91 736 23 17
Fax +34 91 736 23 17
info@kuss.dental.com
www.kuss-dental.com



Este producto fue diseñado para la aplicación en el sector dental y debe ser usado según las indicaciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por un mal uso. Además el usuario queda obligado a comprobar el material antes de su utilización, si es el adecuado para sus fines y si sobre todo si dichos fines están indicados en las instrucciones.

Versión 04 Fecha de la última modificación: 11.05.2015

Leyenda

	Numero de lote		Temperatura de almacenaje
	Fecha de caducidad		Fabricante
	Leer instrucciones de uso		Proteger de la luz