

Observaciones para el uso de la pulidora de circonio no sinterizado *Cisne 2 en 1*

La pulidora *Cisne 2 en 1* es un instrumento especial para una eliminación segura de jitos de fresado en trabajos de circonio no sinterizado.

Gracias a las dos partes de la pulidora y su especial ergonomía permite trabajar minimizando el riesgo de dañar el objeto de circonio accidentalmente.

Con la parte gris más gruesa se puede reducir rápidamente el jito de fresado hasta poco antes de llegar a la forma final.



A continuación se repasa el resto con la parte blanca fina sin cambiar de instrumento. Se evita la retirada de demasiado material precisamente en esta fase, más delicada.



Así tenemos un solo instrumento para el repasado grueso y fino.

Observaciones para el uso de la pulidora de circonio no sinterizado *Cisne 2 en 1*

La segunda parte blanca precisamente no sirve para conseguir un alto brillo, sino para garantizar una eliminación del material. Además en ciertas circunstancias podría resultar una absorción distinta del glaseado en partes pulidas y aquellas sin pulir.



Se minimiza el descarte y la tensión en el objeto se aproxima a cero.

Puesto que los materiales de circonio no sinterizado tienen diferentes durezas desarrollamos una variación complementaria fabricada de un material aglutinante más duro y con una forma más pequeña para dar una respuesta adecuada a las sugerencias que llegaron de los usuarios.

Cisne tipo A



Cisne tipo B

