

Benutzungshinweise zu Weißlingspolierer BWG164104MF:



Beim BWG164104MF handelt es sich um einen Spezialpolierer für die risikofreie Entfernung der Haltestege bei Weißlingsarbeiten.

Durch die zwei Zonen und die spezielle Ergonomie ist ein rationelles Arbeiten möglich mit stark reduziertem Risiko, durch Unachtsamkeit die Arbeit zu beschädigen.

Mit der grünen Stufe kann der Frässteg ergonomisch angenehm und schnell reduziert werden bis kurz vor die gewünschte Endgeometrie.



Anschließend wird mit der weißen feineren Stufe ohne Umspannen der letzte Rest eingeebnet. Ein zu großer Abtrag gerade in der letzten brisanten Phase ist durch den geringeren Abtrag ausgeschlossen.



So wird die Brücke geschlagen zwischen hohem Abtrag und vorsichtiger Endbearbeitung.

Benutzungshinweise zu Weißlingspolierer BWG164104MF:



Auf einen Hochglanz in der zweiten Stufe wurde bewusst verzichtet um den Abtrag nicht zu gering werden zu lassen. Außerdem ergäbe sich dadurch u.U. eine veränderte Glasuraufnahme.



Ausschuss wird so minimiert und der Stressfaktor geht gegen Null.

Da es bei den Weißlingsmaterialien unterschiedliche Härtearten gibt, wurde eine Ergänzungstypen entwickelt aus einem zäheren Bindungsmaterial und aufgrund Anwenderrückmeldungen auch in einer verkleinerten Geometrie:

Abb. AWG560104MF

BWG164104MF (hier vorgestellt)

