

# Kiero Ceramic Repair Kit

- Instrucciones ilustradas -



¿Y ahora- Qué?



Este Kit de reparación de la  
cerámica es la solución



**KUSS**  
**DENTAL**  
Innovative Products  
Made in Europe

# Kiero Ceramic Repair Kit

Sistema para la reparación de cerámica fracturado universal

- Kiero Repair Primer
  - Adhesivo entre metal/cerámica y el Kiero Repair Bond
- Kiero Repair Opaquer
  - Cubrir el metal
- Kiero Repair Bond
  - Bonding hacia el composite
- Composite habitual de la clinica
  - Acabado de reparación



Situación - Cerámica fracturada



1. Repasar – Preparar la superficie con un diamante de max. 50  $\mu\text{m}$



## 2. Aplicar el Kiero Repair Primer



Dejar secar durante 30 segundos

### 3. Aplicar la Kiero Repair Bond




4. Fotopolimerizar el Ceramic Repair Bond unos 40 segundos (según máquina)



Durante la polimerización desaparece el color verde

5. Aplicar y pulir el composite habitual como siempre

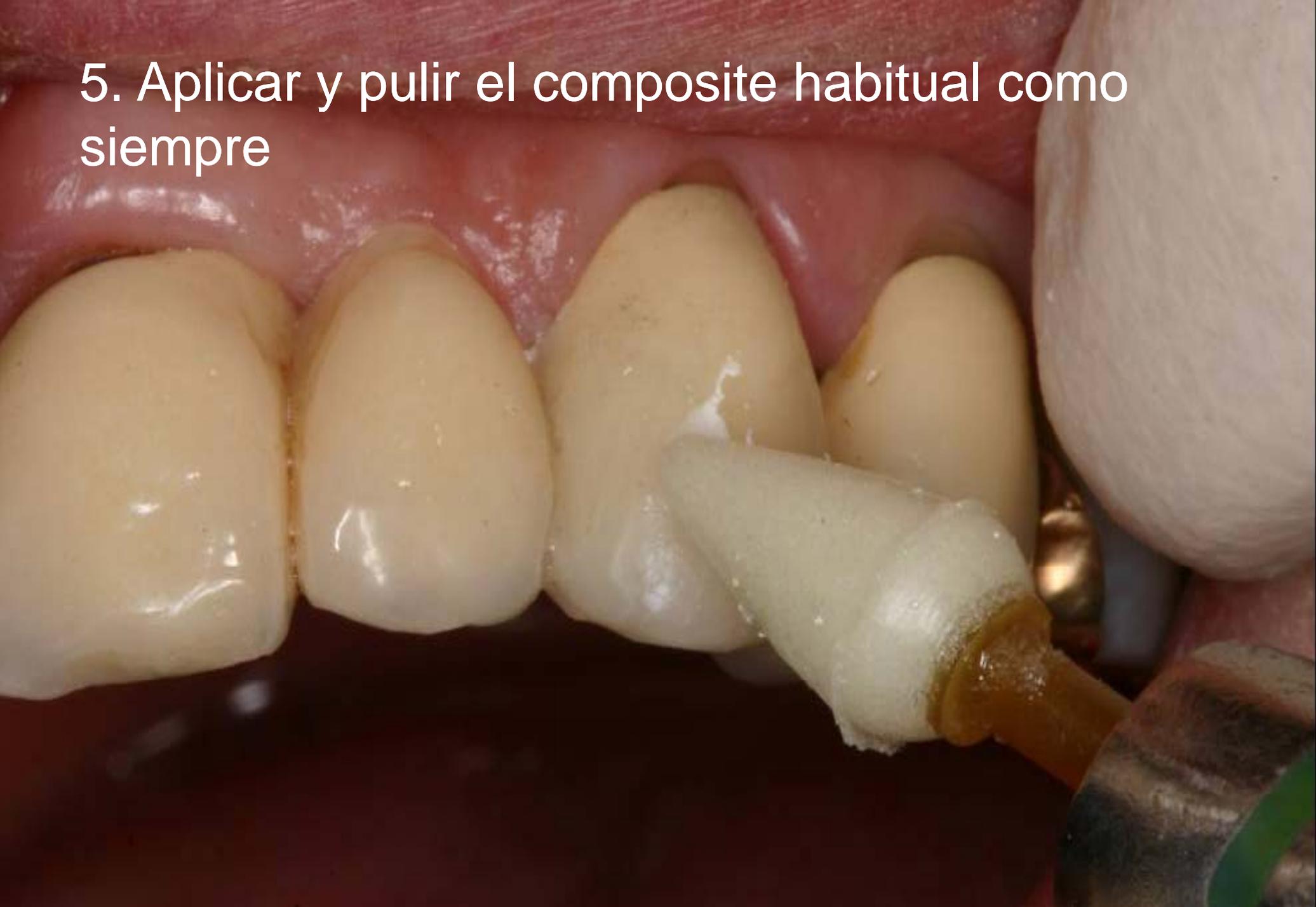

Situación después





Situación  
antes

a 5 minutos



Situación  
después

**KUSS**  
**DENTAL**  
Innovative Products  
Made in Europe

# Caso 2 - Cerámica saltada hasta el metal



# 1. Repasar – Preparar la superficie




## 2. Aplicar el Kiero Repair Primer




### 3. Aplicar el Kiero Repair Opaquer



4. Fotopolimerizar el Kiero Reapir Opaquer según máquina

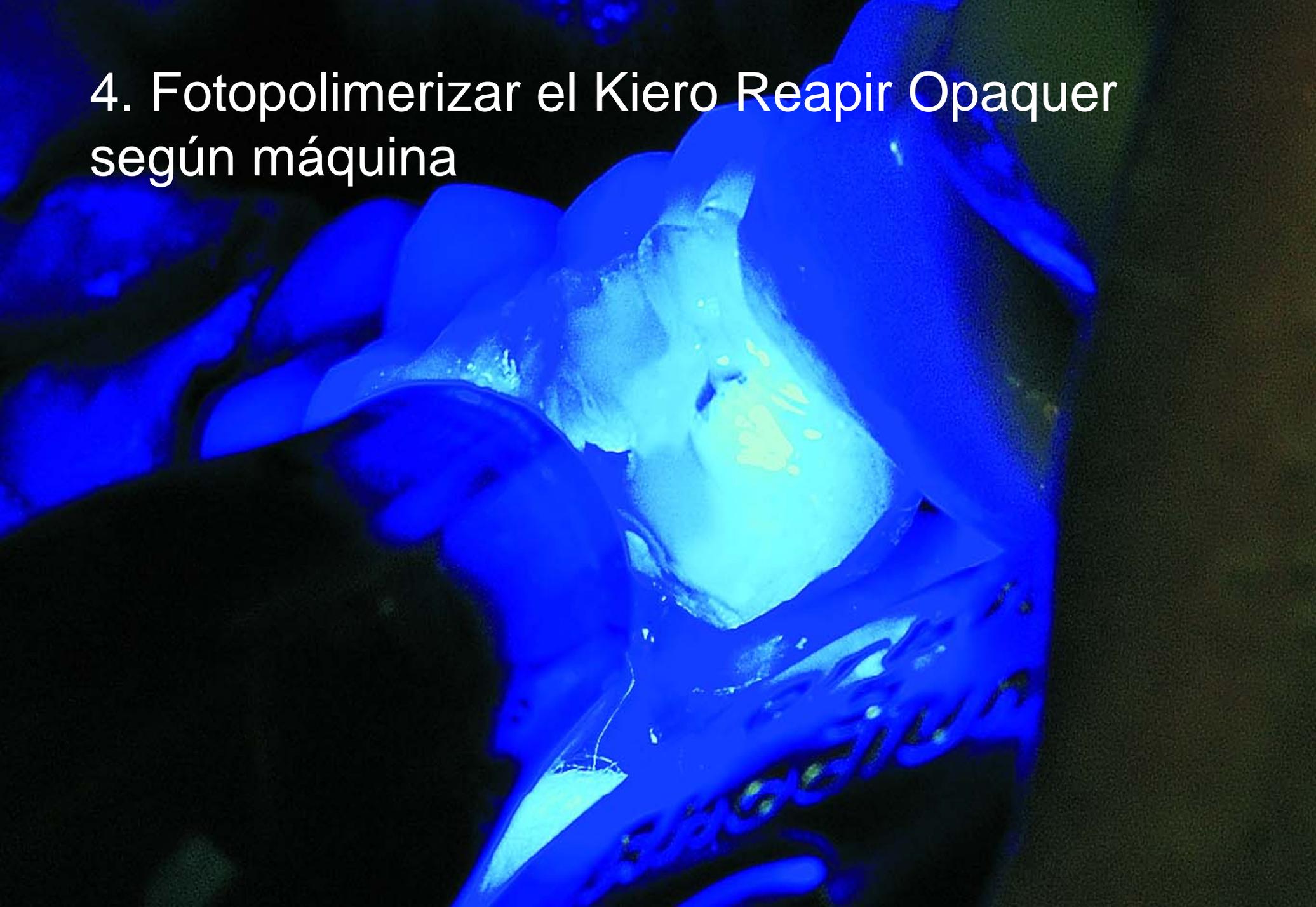

## 5. Aplicar Kiero Repair Bond

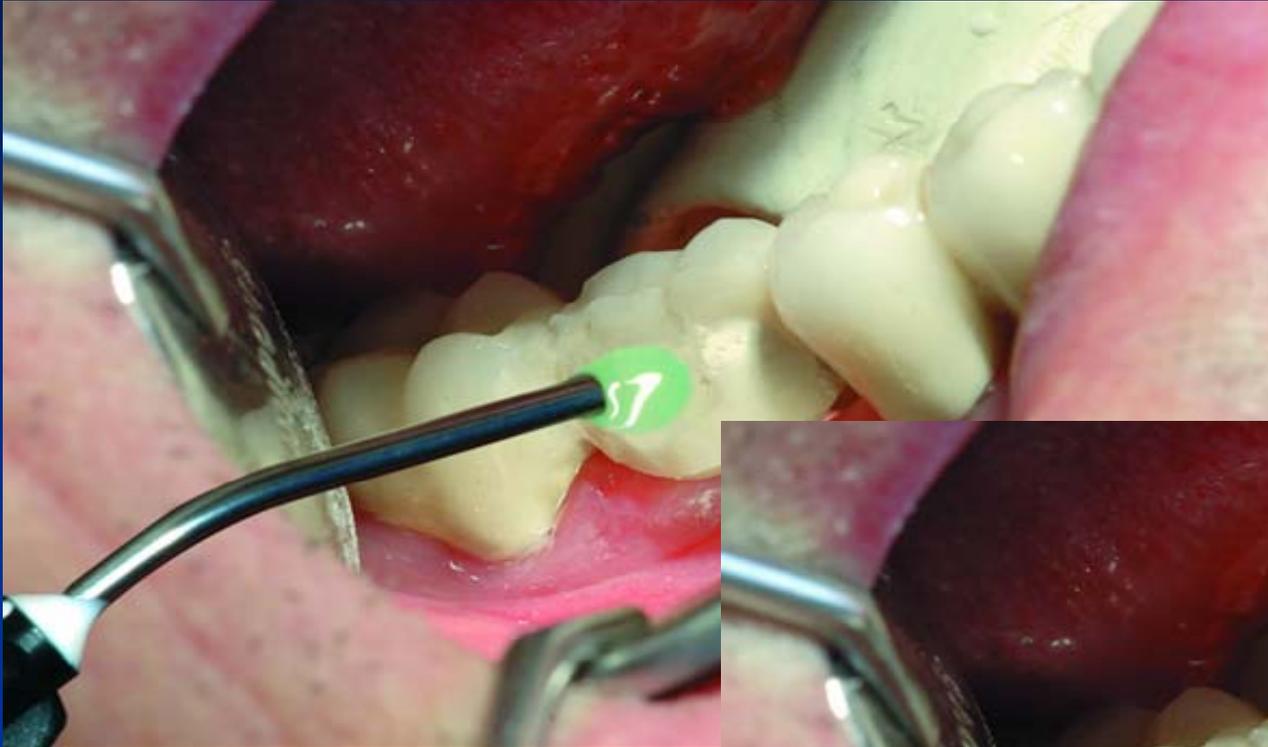

6 .Fotopolimerizar el Kiero Repair Bond  
segun maquina




Situación después

**A cabo de 6 minutos**



# Comparacion con el sistema de antes

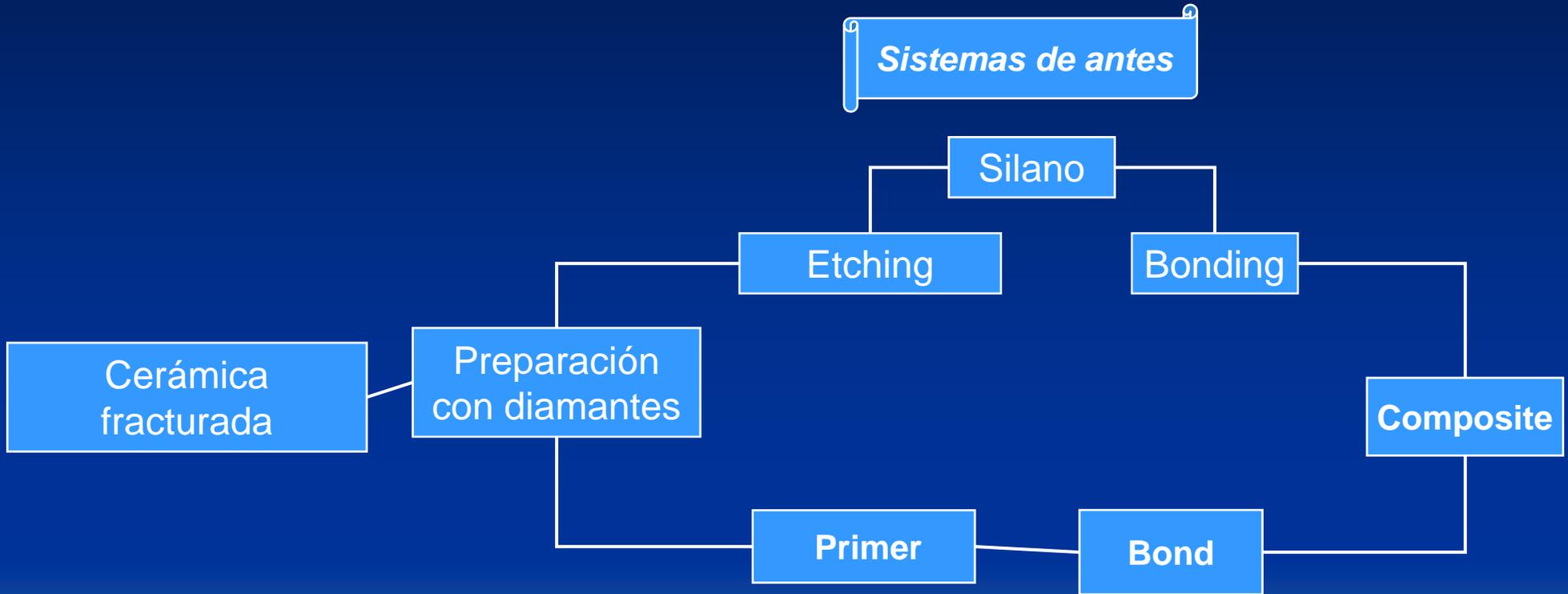

***Kiero Ceramica Repair Kit***

