¡Aclarar un tono en cuestión de segundos!



Denseo Hada bleach: ¡Así se aplica!



La corona demasiado oscura

Se puede aplicar Denseo Hada bleach sobre todas las cerámicas de alta o baja fusión comunes así como sobre estructuras de dióxido de circonio. Se puede aplicar a partir de una temperatura de cocción de 780°C.

Observación: A continuación no se debe poner en un baño sulfúrico.



Repasar la corona

Para que Denseo Hada bleach pueda difundirse en la cerámica chorree la superficie entera del trabajo que quiera blanquear.

A continuación limpie solo con vapor.



Aplicar Denseo Hada *bleach*

Secar cuidadosamente la corona.

Coloque el líquido blanqueador sobre una superficie limpia (p. ej. loseta). Aplique Deseo Hada bleach con un pincel en una capa muy fina y de forma homogénea sobre el trabajo entero.



Cocción

Cueza la corona a la misma temperatura que la cocción de brillo de su cerámica, siendo la temperatura mínima 780°C.



El resultado

En la foto de arriba se aclaró una corona de A2 a A1.

Después de la aplicación de Denseo Hada bleach no hace falta realizar una cocción de brillo. En caso de que se hayan producido algunas manchas blancas por exceso de liquido blanqueador, se eliminarán repasando la corona con unas gomas.