

## Instrucciones de montaje y uso

# metalight classic

Muchas gracias por su decisión de adquirir **metalight classic** de Kuss Dental.

Se suministra la fotopolimerizadora tal y como se ve en la imagen: La máquina de luz metalight classic, cable de alimentación, tapa con filtro rayos UVA integrado, 12 sustancias luminosas especiales (rango espectral de 320 – 400 nm).

Para su utilización se necesita una toma de electricidad de 230 Voltios.

Coloque el metalight classic en una superficie plana y antideslizante. Por favor, para la puesta en marcha siga las siguientes instrucciones:

### Conexión a la red de electricidad

Enchufe el cable suministrado a la base en la parte trasera y conéctelo a un enchufe de electricidad.

### Puesta en marcha

Encienda el metalight classic con el interruptor principal en la parte trasera del equipo. El parpadeo de los LED encima de los botones de fijación del tiempo señala que el equipo se encuentra listo para usar. Coloque su pieza en la cámara de polimerización y cierre la tapa del equipo.

Elija ahora la duración deseada de polimerización (5, 10 o 15 minutos). La refrigeración y las lámparas UVA se encienden automáticamente. Una señal acústica avisa que el tiempo elegido de polimerización haya terminado y las lámparas se apagarán – la refrigeración seguirá funcionando durante cinco minutos. Para corregir un intervalo de tiempo elegido, mantenga presionado durante un segundo el botón elegido; de esta manera, se volverá a su posición inicial.

### Cambio de las sustancias luminosas

Si quiere cambiar las sustancias luminosas, por favor, desconecte primero el metalight classic de la alimentación eléctrica.

Abra la tapa y tirando ligeramente quite las sustancias luminosas de sus bases.

Al pedir sustancias luminosas nuevas por favor tenga en cuenta el correcto rango espectral de la sustancia luminosa – en el metalight classic se instaló por defecto sustancias luminosas con un rango espectral de 320 – 400nm. Coloque la lámpara nueva en el la base y apriétela ligeramente hasta encajar.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al siguiente teléfono de Kuss Dental: +34 91 736 23 17.

### Datos técnicos

Referencia	ML100
Tensión	~ 230 V / 50 Hz
Potencia	máx. 237 W
Protección de la red	230 V – T3,15A
Dimensiones (ØxH)	248x410 mm
Peso	9,1 kg
Rango espectral UVA	320-400 nm (tubos incluidos en el suministro)