

Kiero Seal - Información acerca del producto

Sellador intraoral en forma de gel

Indicación:

Gel de sellado del espacio que pueda quedar entre implantes y aditamentos para el tratamiento profiláctico de la periimplantitis y degeneración ósea

Descripción:

Gel de sellado de cavidades entre implantes y aditamentos protésicos; debido a su construcción, estas cavidades suelen aparecer en todos los implantes de dos piezas habituales en el mercado. Los gérmenes y bacterias, con un tamaño de tan solo 0.01-5 encuentran entre implante y aditamento un medio de vivir idóneo. Kiero Seal penetra en todos los espacios de la cavidad, y por su propiedad tixotrópica y su posterior endurecimiento del material, los sella de manera segura hasta la próxima revisión. No hay que temer un daño en las encías ya que el gel endurecido es química y biológicamente inerte.

Composición:

Siloxano de polidimetilo, sustancias de acoplamiento de acetoxi, sustancias de relleno

Efectos secundarios:

No conocidos

Contraindicaciones:

Se debe evitar el contacto con heridas abiertas, es decir se debe aplicar Kiero Seal en caso de encías sanas, en caso de hipersensibilidades del paciente a uno de estos componentes no se debe usar el producto, o bien únicamente bajo la supervisión estricta del médico/dentista. Al aplicar el producto el dentista tiene que considerar reacciones cruzadas o interacciones del producto médico con otros materiales ya existentes en boca

Almacenamiento:

No usar el material después de la fecha de caducidad
Mantener cerrado y en lugar seco entre 4° y 25° C

Forma de presentación:

- 1 jeringuilla de doble cámara con 5 ml
- 5 cánulas de mezcla
- 5 puntas de aplicación